

145mm

110mm

P/N 002020 Rev.May/22

Mi  está
con **Neutek**

P/N 002020 Rev.May/22

Fabricado por:

Joytech Healthcare Co., Ltd.
No. 365, Wuzhou Road, Yuhang economic development
zone, Hangzhou city, 311100, Zhejiang, China.

Importado y Distribuido en México por:
Citalud, S.A. de C.V.

www.grupocitalud.com
tel: 55 5574 3960
Lada sin costo: 800 462 2545 Sólo para México.



Manual de Usuario Monitor digital automático de Presión Sanguínea de Brazo "Neutek"

Modelo
BP-103H

 **Neutek**
INNOVATION FOR LIFE

Mi  está
con **NEUTEK**[®]

Información de seguridad.....	02
Dibujo de la unidad.....	05
Lineamientos importantes al realizar la prueba.....	08
Inicio rápido.....	09
Operación de la unidad.....	10
Instalación de la batería.....	10
Configuración del sistema.....	11
Colocación del brazalete.....	13
Prueba.....	14
Apagado.....	17
Revisión de la Memoria.....	18
Eliminación de la Memoria.....	19
Promedio de las 3 últimas mediciones.....	20
Indicador de Batería Baja.....	20
Resolución de Problemas.....	21
Información de la presión sanguínea.....	22
Preguntas y respuestas sobre la presión sanguínea.....	25
Mantenimiento.....	26
Especificaciones.....	28
Garantía.....	30

Información de seguridad

02



Gracias por comprar el monitor de presión sanguínea **BP-103H**. La unidad ha sido construida utilizando circuitos confiables y materiales duraderos. Si se usa adecuadamente, esta unidad le dará años de uso satisfactorio.

El Dispositivo está diseñado para utilizarse en adultos y niños mayores de 12 años para medir la presión arterial sistólica, diastólica y el pulso. Todos los valores se pueden leer en la pantalla. La posición para la medición será en el brazo de un adulto.

La medición de la presión sanguínea determinada con este equipo es equivalente a las obtenidas por un observador capacitado utilizando el método de auscultación con un brazalete/ estetoscopio, dentro de los límites establecidos por la American National Standard (ANSI/AAMI SP10) para esfigmomanómetros electrónicos.

Precauciones para garantizar un funcionamiento seguro y confiable

1. No deje caer la unidad. Proteja de golpes.
2. No inserte objetos extraños en las aberturas.
3. No intente desarmar la unidad
4. No aplaste el brazalete de presión.
5. Si la unidad ha sido almacenada a temperaturas inferiores a 0°C guárdelo en un lugar cálido durante 15 minutos antes de operarlo. De lo contrario el brazalete no inflará.
6. No guarde la unidad bajo la luz solar directa, humedad o polvo.





Precaución

03


1. No confunda el auto monitoreo con el auto diagnóstico. La medición de la presión arterial solo debe de ser interpretada por un profesional de la salud que conozca su historial médico.
2. Comuníquese con su médico si los resultados regularmente indican lecturas anormales.
3. Si está tomando medicamentos, consulte a su médico para determinar el momento más adecuado para medir la presión arterial. **NUNCA** cambie un medicamento prescrito sin antes consultar a su médico.
5. Para personas con circulación irregular o inestable que resulta del padecimiento de la diabetes, enfermedad hepática, arteriosclerosis u otras condiciones médicas, puede haber variaciones en los valores de presión arterial medidas en la muñeca contra la parte superior del brazo. No obstante, es útil e importante monitorear las tendencias de la presión arterial tomadas en el brazo o en la muñeca.
6. Personas que sufren constricción vascular, trastornos de hígado o diabetes, las personas con marcapasos o un pulso débil y las mujeres que están embarazadas deben consultar a su médico antes de medir su presión arterial ellos mismos. Diferentes valores pueden ser obtenidos debido a su condición.
7. Las personas que sufren de arritmias como latidos prematuros auriculares o ventriculares o fibrilación auricular sólo utilice el monitor de presión arterial en consulta con su médico. En algunos casos el método de medición oscilométrico puede producir lecturas no correctas.
8. El producto está diseñado para su uso previsto únicamente. No lo mal use de ninguna manera.

04 Precauciones con la batería





9. El producto no está diseñado para bebés o personas que no pueden expresar sus intenciones.
10. Cualquier peligro asociado con la sobreinflación prolongada del brazalete.
11. No desmonte la unidad o brazalete. No intente reparar, solo el personal autorizado puede realizar reparaciones.
12. Utilice solamente el brazalete aprobado para esta unidad. El uso de otros brazaletes puede resultar en mediciones incorrectas.
13. La unidad puede producir lecturas incorrectas si se almacena o se utiliza fuera de los rangos de temperatura y humedad especificados en el manual.
14. No use teléfonos celulares y otros dispositivos que generen campos electrónicos o electromagnéticos, cerca del dispositivo, pueden causar lecturas incorrectas e interferencia o convertirse en una fuente de interferencia para el dispositivo.
15. No mezcle baterías nuevas y usadas al mismo tiempo.
16. Reemplace las baterías cuando el indicador de batería baja aparezca en la pantalla.  Sustituya las dos pilas a la vez.
17. No mezcle baterías de diferente tipo. Se recomiendan baterías alcalinas de larga duración.
18. Retire las baterías del dispositivo cuando no esté en funcionamiento por más de 3 meses.
19. No inserte las baterías con la polaridad incorrecta.
20. Deseche las baterías correctamente. Consulte las leyes y reglamentos locales.
21. Utilice solamente el adaptador AC que cumpla con el requerimiento EN 60601-1 y EN 60601-1-2. Un adaptador Ac no autorizado puede causar daño, fuego o electrocución.
22.  Consulte las instrucciones antes de usar.

Unidad Monitor

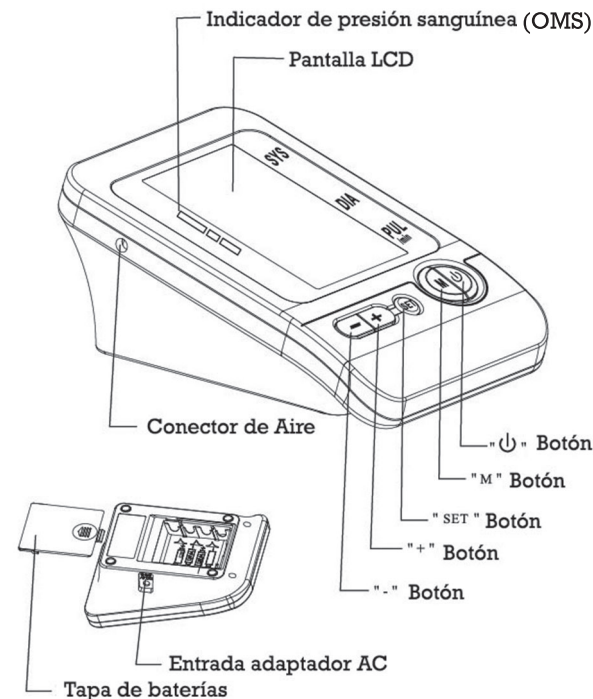

Dibujo de la Unidad del monitor 05


06 Dibujo de la Unidad del brazalete

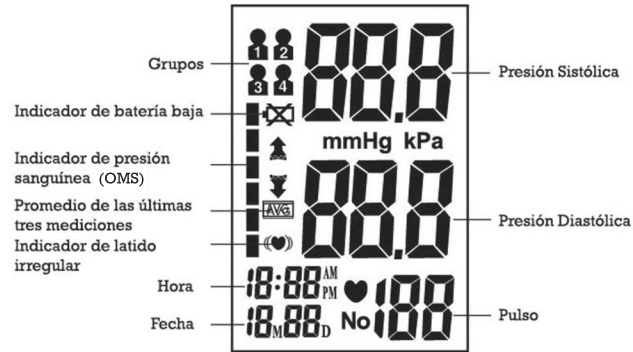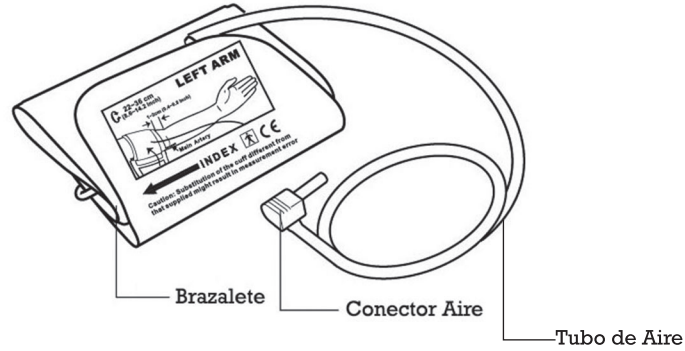

Pantalla

07 Dibujo de la Unidad Contenido

Contenido

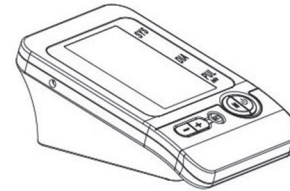

Unidad Monitor



Manual de usuario



Estuche



Brazalete




Adaptador AC (DC 6.0 v.600 mA.)
(Opcional, no incluido)



Lineamientos importantes al realizar la prueba

1. Evite comer, hacer ejercicio y bañarse los 30 minutos previos a la prueba.
2. Siéntese en un ambiente tranquilo durante por lo menos los 5 minutos previos a la prueba.
3. No se incorpore durante la prueba. Siéntese en una posición relajada manteniendo el brazo al nivel del corazón.
4. Evite hablar o mover las partes del cuerpo durante la prueba.
5. Durante la prueba evite las interferencias electromagnéticas fuertes tales como los hornos de microondas y los teléfonos celulares.
6. Espere 3 minutos o más antes de volver a realizar la prueba.
7. Procure medir su presión sanguínea a la misma hora todos los días para que haya consistencia.
8. Las comparaciones de la prueba solo deben realizarse cuando el monitor se usa en el mismo brazo, en la misma postura y a la misma hora del día.
9. Este monitor de presión sanguínea no se recomienda para personas con arritmia severa.

1. Instale las baterías (vea la Figura A)
2. Inserte el enchufe de aire del brazalete en el lado izquierdo de la unidad del monitor (vea la Figura B)
3. Retire la ropa gruesa del área del brazo
4. Descanse durante varios minutos antes de la prueba. Siéntese en un lugar tranquilo, de preferencia en un escritorio o mesa con su brazo descansando sobre una superficie firme y sus pies apoyados en el piso (vea la Figura C)
5. Coloque el brazalete a su brazo izquierdo y manténgalo a nivel del corazón. La parte de abajo del brazalete debe de colocarse a aproximadamente 1-2 cm (0.4-0.8") arriba del doblez del codo. (vea las Figuras D y E)
6. Presione el botón  para iniciar la prueba.

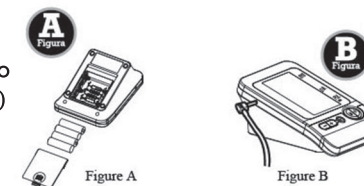


Figure A

Figure B



Figure C

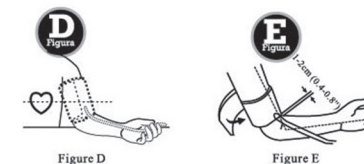


Figure D

Figure E

Instalación de las baterías


Deslice la tapa de las baterías como lo indica la flecha.

Instale 4 baterías alcalinas nuevas tipo AA de acuerdo con la polaridad.

Cierre el compartimiento de las baterías.

La clavija del adaptador de AC se encuentra en el lado derecho del monitor. El adaptador AC (DC 6.0 V, 600 mA) con el aparato (se recomienda pero no se proporciona). El perno de conexión del adaptador debe de tener polaridad positiva en el interior y polaridad negativa en el exterior con una junta coaxial de 2.1 mm.

No se use ningún otro tipo de adaptador de AC ya que puede dañar la unidad.

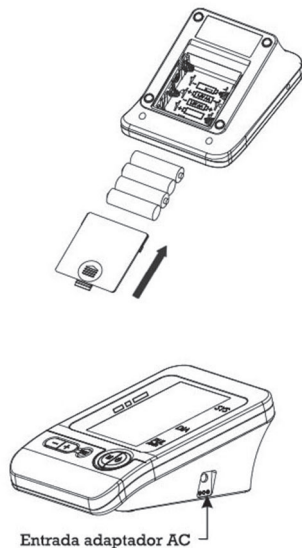

Ajustes del sistema


Con el aparato apagado, presione el botón "SET" (ajuste) para activar los ajustes del sistema. El ícono de grupo de memoria parpadea.

1. Seleccione grupo de memoria

Mientras el aparato se encuentre en el modo de ajuste del sistema, puede acumular los resultados de las pruebas en cuatro grupos diferentes. Esto permite a los diversos usuarios memorizar sus resultados de prueba individuales (hasta 30 memorias por grupo). Presione el botón "+" o "-" para escoger un ajuste de grupo. Los resultados de la prueba se almacenarán automáticamente en cada grupo seleccionado.

2. Ajuste de la hora y fecha


Presione nuevamente el botón "SET" para ajustar el modo de la hora y la fecha. Ajuste primero el mes con ayuda del botón "+" o "-". Presione nuevamente el botón "SET" para confirmar el mes actual. Continúe ajustando el día, la hora y el minuto de la misma manera. Cada vez que se presiona el botón "SET" se bloquea en la selección y continúa en sucesión (mes, día, hora, minuto).

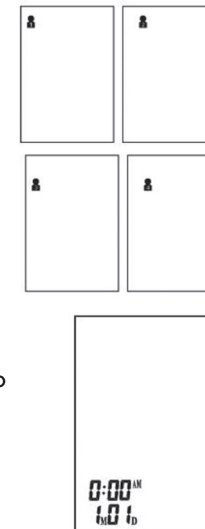



Operación de la unidad

12



3. Ajustes guardados. Sin importar en qué modo de ajuste se encuentre, presione el botón  para apagar la unidad. Toda la información será guardada.

Nota: Si se deja la unidad y no se usa durante 3 minutos, ésta guardará automáticamente cualquier información y se apagará

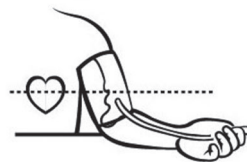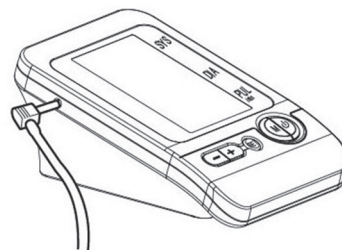

Operación de la unidad

13

Colocación del brazalete

1. Inserte con firmeza el enchufe de aire dentro de la abertura ubicada en el lado izquierdo de la unidad del monitor.
2. Con la sección de nilón adherente viendo hacia afuera, inserte el extremo del brazalete por debajo del anillo de metal del brazalete.
3. Asegure el brazalete de 1-2 cm (0.4"-0.8") por arriba del dobléz del codo. Para mejores resultados coloque el brazalete sobre el brazo desnudo y mantenga el brazo a nivel del corazón durante la prueba.

Nota: no inserte el enchufe del aire en la abertura ubicada en el lado superior de la unidad del monitor. Esta abertura está diseñada solamente para suministro de energía opcional.

Operación de la unidad

14




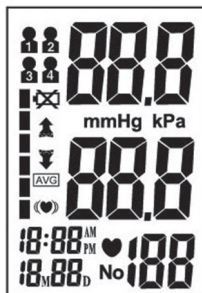
Prueba

1. Encendido

Presione el botón de encendido/apagado hasta que suene un "bip". Aparecerá la pantalla LCD por un segundo mientras la unidad lleva a cabo un diagnóstico rápido. Un tono largo indica que el aparato está listo para la prueba.

Nota: la unidad no funcionará si se encuentra presente aire residual de pruebas previas dentro del brazalete.

La pantalla LCD parpadeará con el símbolo  hasta que se estabilice la presión.



Operación de la unidad


15

2. Presurización


La presión inicial se bombea al principio a 190 mm Hg. Si la presión sistólica actual del usuario es alta, la unidad se re-inflará de manera automática al nivel apropiado.

Nota: la presurización bajará gradualmente y finalmente se suspenderá cuando el brazalete no está bien colocado en el brazo. Si esto ocurre, vuelva a colocar el brazalete y continúe la prueba presionando el botón "M".

3. Prueba

Después del inflado del brazalete, el aire bajará lentamente debido al valor correspondiente de la presión del brazalete. Aparecerá el símbolo  parpadeante de manera simultánea en la pantalla señalando la detección del latido cardíaco.

Nota: Manténgase relajado durante la prueba. Evite hablar o mover las partes del cuerpo.

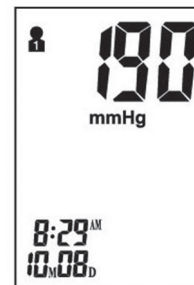

4. Exhibición de los resultados

Suenan tres "bips" cortos cuando ha terminado la prueba. La pantalla exhibirá las mediciones para las presiones sanguíneas sistólicas y diastólicas. Aparecerá un indicador representando la medición actual cerca de la clasificación OMS correspondiente.

Nota: Refiérase a las páginas 23-24 para los detalles sobre la información de la clasificación OMS de la presión sanguínea.

Indicador de latido cardíaco irregular

Si el monitor detecta un ritmo cardíaco irregular dos o más veces durante el proceso de medición, aparecerá el símbolo de "latido cardíaco irregular" (♥) con los resultados de la medición. El ritmo de latido cardíaco irregular se define como un ritmo ya sea 25% más lento o más rápido que el ritmo promedio detectado durante la medición de las presiones sanguíneas sistólicas y diastólicas. Consulte a su médico si el símbolo de "latido cardíaco irregular" (♥) aparece frecuentemente con sus resultados.

Indicator



5. Eliminando/guardando los resultados de las pruebas

El usuario puede eliminar sus resultados actuales de la prueba debidos a condiciones de la prueba desfavorables o por cualquier otra razón. Para eliminar el último resultado de la prueba, presione el botón "SET" después de que se haya exhibido el resultado. Si el resultado no es eliminado, será guardado automáticamente por fecha dentro del grupo de memoria configurado previamente.

Nota: Asegúrese de que se realizó la selección de grupo de memoria apropiado antes de la prueba.

Si el número de las pruebas sobrepasa las 30 memorias permitidas por grupo, aparecerán primero las pruebas más recientes, eliminando por tanto las más antiguas.

6. Segunda prueba

Presione el botón (⏪) si se va a realizar una segunda prueba. Esto lo llevará directamente al modo de prueba.


Nota: espere 3 minutos o más antes de volver a realizar la prueba.

Operación de la unidad


18



Apagado de la unidad

El botón  para apagar la unidad en cualquier modo de operación. La unidad se puede apagar de manera autónoma después de aproximadamente 3 minutos sin operación en ningún modo.

Precauciones de seguridad

Si la presión en el brazalete se convierte en muy extrema durante la prueba, presione el botón  para apagar el aparato. La presión del brazalete se disipará rápidamente una vez que la unidad se haya apagado.


Revisión de la memoria

Se pueden revisar los resultados pasados con el aparato apagado usando los botones "+" o "-". Los resultados más recientes se pueden visualizar presionando y reteniendo el botón "+". Los resultados más antiguos se pueden visualizar presionando y reteniendo el botón "-". Al activar los resultados de la prueba, puede presionar los botones "+" o "-" para desplazarse a través de todos los resultados guardados en la memoria. El modo de presurización de la unidad (modo de prueba) se puede activar cuando se presiona el botón "M" mientras se revisan los resultados de las pruebas.



Operación de la unidad

19

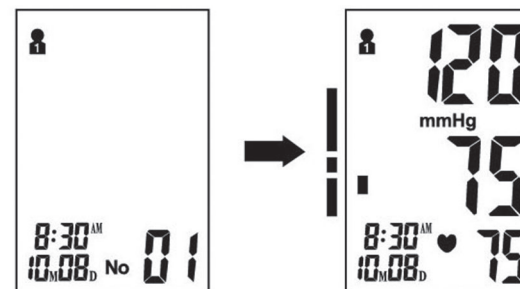


Nota: los últimos resultados de las pruebas solo se mostrarán respecto del grupo de memoria usado más recientemente. Para revisar los resultados de las pruebas pasadas en otros grupos de memoria, debe seleccionar primero el grupo deseado y después apagar el monitor. (Vea "selección del grupo de memoria" en la página 11).

Operación de la unidad



20



Eliminación de la memoria.

Se puede eliminar la memoria para un grupo seleccionado mientras se encuentra en el modo de revisión de memoria. Presione y retenga el botón "SET" durante aproximadamente 3 segundos para borrar todos los registros de memoria del grupo seleccionado. El monitor emitirá un "bip" indicando que la eliminación fue exitosa y después se transferirá al modo de prueba. Para eliminar memorias de otros grupos, consulte "Seleccionar grupo de memorias" en la página 11. Presione el botón "M" para iniciar la prueba o presione el botón  para apagar la unidad.


Nota: no se puede recuperar la memoria una vez que ha sido borrada.

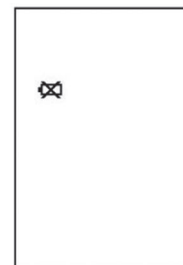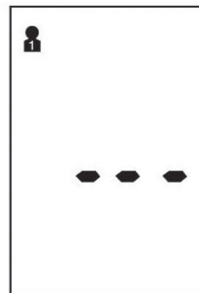

Operación de la unidad


21

Promedio de las últimas tres pruebas

Con el aparato apagado, presione y retenga el botón "M" para activar la función de la pantalla. después de que la unidad lleve a cabo un auto diagnóstico, la pantalla exhibirá las tres últimas lecturas del último grupo usado. El símbolo  aparecerá junto con el indicador de presión sanguínea WHO. Se puede acceder al modo de revisión de la memoria presionando los botones "+" o "-". Para revisar los resultados promedio de otros grupos, seleccione el grupo deseado antes de activar el botón "M" en la posición de apagado. (Vea "selección del grupo de memoria" en la página 11).

Nota: en este modo, el usuario puede acceder al modo de prueba presionando el botón "M".

Indicador de batería baja

Suena 4 "bips" de advertencia cortos cuando la vida de la batería se ha agotado y es incapaz de inflar el brazalete para la prueba. El símbolo  aparece simultáneamente durante aproximadamente 5 segundos antes de apagarse. Cambie las baterías en este momento. No se perderá ninguna memoria a lo largo de este proceso

Operación de la unidad

22



Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
Los resultados de la presión sanguínea no se encuentran dentro del rango típico	El brazalete está muy apretado o no se encuentra colocado de manera adecuada en el brazo.	Vuelva a colocar el brazalete de manera firme aproximadamente 1-2 cm (0.4"-0.8") por arriba del doblez del codo (vea la página 13).
Los resultados de la presión sanguínea no se encuentran dentro del rango típico	Resultados de la prueba inexactos debido al movimiento del cuerpo o al movimiento del monitor	Siéntese en una posición relajada con el brazo colocado cerca del corazón. Evite hablar o mover partes del cuerpo durante la prueba. Asegúrese de que la unidad del monitor esté colocada en una posición estacionaria durante el periodo de prueba. (vea la página 9).
Muestra "Err"	El brazalete no se infla de manera correcta	Asegúrese de que la manguera esté colocada de manera correcta tanto al brazalete como a la unidad del monitor.
Muestra "Err"	Operación no adecuada	Lea el manual del usuario cuidadosamente y vuelva a realizar la prueba.
Muestra "Err"	La presurización se encuentra por arriba de 300 mmHg	Lea el manual del usuario cuidadosamente y vuelva a realizar la prueba.




Información de la presión sanguínea 23

Presión sanguínea

La presión sanguínea es la fuerza de la sangre que se ejerce sobre las paredes de las arterias. De manera típica se mide en milímetros de mercurio (mm Hg). La presión sanguínea sistólica es la fuerza máxima ejercida contra las paredes de los vasos sanguíneos cada vez que late el corazón. La presión sanguínea diastólica es la fuerza ejercida sobre los vasos sanguíneos cuando el corazón se encuentra en reposo entre latidos.

La presión sanguínea de un individuo cambia frecuentemente a través del curso de un día. La agitación y la tensión pueden provocar que se eleve la presión sanguínea, mientras que el beber alcohol y bañarse pueden bajar la presión sanguínea. Algunas hormonas como la adrenalina (la cual libera el cuerpo bajo estrés) pueden provocar que los vasos sanguíneos se constriñan, provocando una elevación en la presión sanguínea.

Si estos números medidos se vuelven muy elevados, significa que el corazón está trabajando más fuerte de lo que debería.

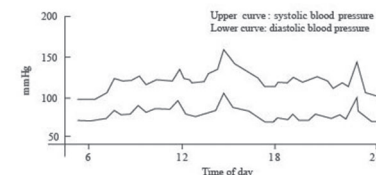


Ejemplo: fluctuación durante un día (varón, 35 años de edad)

Información sobre la presión sanguínea 24



Indicador de la clasificación de la presión sanguínea. OMS

El monitor BP-103H está equipado con un indicador de la clasificación basado en los lineamientos establecidos por la Organización mundial de la salud. La carta que se muestra a continuación, indica los resultados de las pruebas (con código de colores en la unidad del monitor).

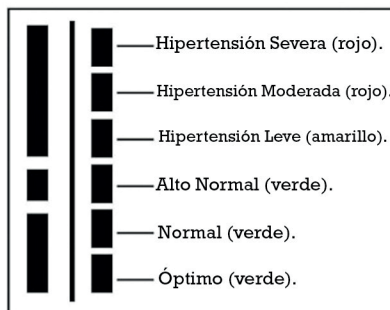

■: Indicador de la clasificación de la presión sanguínea




Información sobre la presión sanguínea 25

Recordatorio de salud

La hipertensión es una enfermedad peligrosa que puede afectar la calidad de la vida.

Puede llevar a una multitud de problemas incluyendo fallo cardíaco, fallo renal y hemorragia cerebral. Manteniendo un estilo de vida saludable y visitando a su médico con frecuencia, la hipertensión y las enfermedades relativas son mucho más fáciles de controlar cuando son diagnosticadas en sus etapas tempranas.

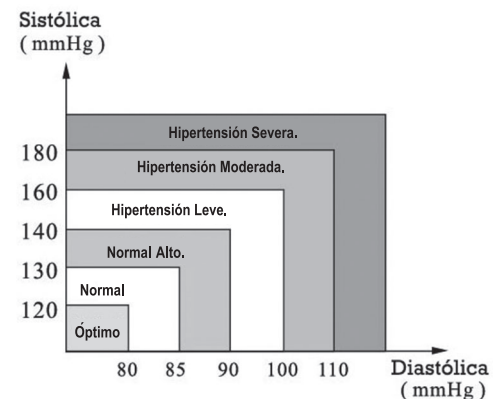

Nota: no se alarme si se presentan lecturas anormales. Una mejor indicación de la presión sanguínea se presenta después de que han tomado de 2 a 3 lecturas a la misma hora del día durante un período de tiempo extendido. Consulte a su médico si los resultados de la prueba aparecen anormales.

Preguntas y respuestas sobre la presión sanguínea 26



Preguntas y respuestas sobre la presión sanguínea.

P: ¿Cuál es la diferencia entre medir la presión sanguínea en el hogar y medirla en una clínica profesional de cuidado de la salud?

R: Actualmente se considera que las mediciones de la presión sanguínea tomadas en el hogar dan una cuenta más exacta ya que reflejan mejor su vida diaria. Las lecturas pueden ser elevadas cuando se toman en una clínica o en un ambiente médico. Esto se conoce como "hipertensión de bata blanca" y puede ser causada por sentirse ansiosos o nerviosos.

Nota: Los resultados anormales pueden ser causados por:

1. Colocación incorrecta del brazalete
Asegúrese de que el brazalete esté cómodo, no muy apretado o muy suelto.
Asegúrese de que la parte inferior del brazalete esté aproximadamente a 1-2 cm (1/2") arriba del dobléz del codo.
2. Posición incorrecta del cuerpo
Asegúrese de mantener su cuerpo en una posición correcta
3. Sensación de ansiedad o nerviosismo
Tome dos o tres aspiraciones profundas, espere unos pocos minutos y vuelva a realizar la prueba.



Preguntas y respuestas sobre la presión sanguínea 27

P: ¿Qué es lo que causa las lecturas diferentes?

R: La presión sanguínea varía durante el curso del día. Muchos factores, incluyendo la alimentación, el estrés, la colocación del brazalete, etc., pueden afectar la presión sanguínea de un individuo.


P: ¿Debo colocar el brazalete en el brazo izquierdo o en el brazo derecho? ¿Cuál es la diferencia?

R: Se puede usar en cualquier brazo al realizar la prueba, sin embargo, al comparar resultados, se debe usar el mismo brazo. La prueba en el brazo izquierdo puede proporcionar resultados más exactos ya que está ubicado más cerca del corazón.


P: ¿Cuál es la mejor hora del día para realizar la prueba?

R: La hora de la mañana o a cualquier hora en que se sienta relajado y sin estrés.

1. Evite dejar caer, golpear o aventar la unidad.

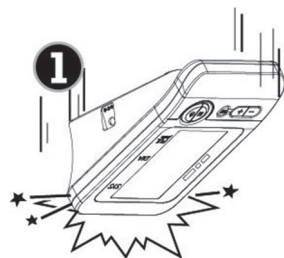

2. Evite las temperaturas extremas. No lo use en exteriores.

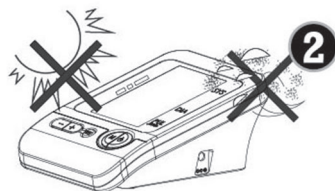

3. Al limpiar la unidad, use un paño suave y limpie ligeramente con detergente suave. Use un paño húmedo para retirar la suciedad y el exceso de detergente.





4. Limpieza del brazalete: no remoje el brazalete en agua! Aplique una pequeña cantidad de alcohol para frotar a un paño suave para limpiar la superficie del brazalete. Use un paño húmedo (base agua) para limpiar. Permita que el brazalete se seque de manera natural a temperatura ambiente.

5. No use petróleo, thinner o solventes similares.

6. Retire las baterías cuando no se vaya a usar el aparato durante un período de tiempo extendido.

7. No desarme el producto, solo personal autorizado.

8. Se recomienda revisar el funcionamiento cada dos años. (Contacte el Centro de Servicio).

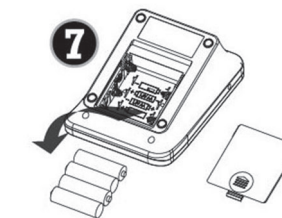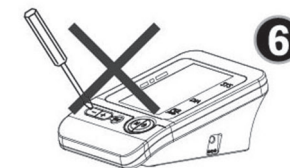

Descripción del producto	Monitor digital automático de Presión Sanguínea de Brazo "Neutek"	
Modelo	BP-103H	
Pantalla	Pantalla digital LCD tamaño 84.1 mm x 55.1 mm (3.31" x 2.17")	
Método de medición	Método oscilométrico	
Rango de la medición	Presión	0 a 300 mmHg
	Pulso	30 a 180 pulsaciones /minuto
Exactitud	Presión	± 3 mm Hg
	Pulso	± 5 %
Presurización	Presurización automática	
Memoria	120 memorias en cuatro grupos con fecha y hora	
Función	Detección de latido cardíaco irregular	
	Indicador de la clasificación OMS	
	Promedio de los últimos 3 resultados	
	Detección de batería baja	
	Apagado automático	
Fuente de poder	4 baterías tamaño "AA" o adaptador médico de AC (DC 6.0 V, 1000 mA) (recomendado, no proporcionado)	
Vida de la batería	Aproximadamente 2 meses con 3 pruebas por día	
Peso de la unidad	Aproximadamente 350 g (12.36 oz) (excluyendo la batería)	
Función de memoria	120 memorias	
Dimensiones de la unidad	Aprox. 405 g (14.30 oz) (excluyendo la batería)	
Circunferencia del brazalete	22.0 cm – 36.0 cm (8.6" – 14.2")	
Ambiente de operación	Temperatura	5°C a 40°C (41°F – 104°F)
	Humedad	<85% H. R.
	Presión	Presión atmosférica
Ambiente de almacenamiento	Temperatura	-10°C a 55°C (14°F – 131°F)
	Humedad	< 95% H. R.
Clasificación	Equipo con poder interno. Equipo tipo BF	

Este dispositivo cumple con las disposiciones de la directiva EC 93/42/EEC (Directiva de dispositivos médicos) Está diseñado de conformidad con el estándar europeo EN 1060. Esfigmomanómetros no invasivos Parte I: Requisitos generales y Parte 3: Requisitos complementarios para los sistemas electromecánicos de medición de presión.



Desecho adecuado de este producto

(Desecho de equipos eléctricos y electrónicos)

La marca que se muestra en el producto indica que éste no debe desecharse con otros desechos domésticos al final de su vida útil, para prevenir el daño potencial al ambiente o a la salud humana, sírvase separar este producto de otros tipos de desechos y reciclarlo de manera responsable. Cuando deseche este tipo de producto, póngase en contacto con el distribuidor en donde fue comprado o póngase en contacto con la oficina local del Gobierno para conocer los detalles respecto de cómo debe de ser desechado este artículo en un centro de reciclado seguro para el ambiente.

Este producto no debe de mezclarse con otros desechos comerciales para su desecho. Este producto se encuentra libre de materiales riesgosos.

Los usuarios comerciales deben comunicarse con su proveedor y verificar los términos y condiciones del acuerdo de compra.

Importador: Citisalud, S.A de C.V.

Ubicado en: Avenida Tezozomoc No. 92,
Colonia San Miguel Amantla, C.P. 02700, Azcapotzalco,
Ciudad de México, México.
R.F.C CIT-041221-7B1
Tels: 55 5574-3960 y 800 462 2545

www.grupocitalud.com

CONDICIONES

1.- La Garantía se hará efectiva presentando esta póliza documentada y sellada por el establecimiento que la vendió o la factura, o recibo o comprobante junto con el producto en nuestro Centro de Servicio, ubicado en Avenida Tezozomoc No. 92, Colonia San Miguel Amantla, C.P. 02700, Azcapotzalco, Ciudad de México, México. Tel. 555574-3960 y 800 462 2545 donde podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

2.- Citisalud, S.A. de C.V. a través de su centro de servicio al cliente, se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y componentes incluyendo mano de obra sin ningún cargo para el consumidor, esta garantía cubre los gastos de envío o transportación del producto que se deriven de su cumplimiento dentro de cualquier parte de la República Mexicana.

3.- El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía en el lugar de compra del producto o bien directamente en nuestro Centro de Servicio.

Citalud, S.A. de C.V. Garantiza por (5) años este producto en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a excepción del Brazaletes que se Garantiza solo por (1) año por razones de uso.

IMPORTANTE

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- A) Cuando el producto se hubiere utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por persona no autorizada por Citisalud S.A. de C.V.

Producto:

Marca:

Modelo:

Serie:

Factura:

Comprada:

Fecha de Compra:

Nombre del distribuidor:

Dirección:

Ciudad:

Estado / C.P.