

# Guía rápida en 3 pasos

**¡IMPORTANTE!**  
30 minutos antes de la medición



NO ALCOHOL, CAFE O TE



NO ESTRÉS



NO FUMAR




NO ACTIVIDAD FÍSICA

**1**

Colocación de pilas


Colocar pilas alcalinas de 1.5 V "AAA" nuevas, no recargables.

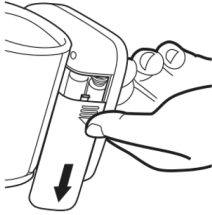

**2**

Colocación del brazalete

Coloque la palma de la mano hacia arriba y deje los dedos relajados; coloque el brazalete como lo indica la imagen.

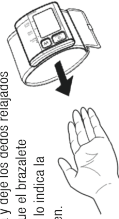

Ajuste el brazalete hasta que quede firme y cómodo.



**3**

Medición de presión arterial

Siéntese con la espalda recta y apoyada, como lo muestra la imagen.



Presione **START-STOP** una vez. Coloque el brazo cruzando, la mano hacia el hombro derecho.

El brazalete se inflará automáticamente, sin moverse ni hablar, espere a que se desinflen y muestre los resultados.



Lea el manual de instrucciones de este medidor de presión antes de tomarse la presión por primera vez. y/o cuando tenga alguna duda.

**ATENCIÓN A CLIENTES**

Si tiene alguna duda o experimenta problemas, llame:

Desde la Cdad. de México Desde el interior de la República

**5574 3960 / 01 800 462 2545**

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**Importador y Distribuidor en Mexico:**

Citalud, S.A. de C.V.

**Ubicado en:**

Avenida Tezozómoc No. 92,  
 Colonia San Miguel Amantla, C.P. 02700,  
 Azcapotzalco, Ciudad de México, México.  
 Tel: 55 5574 3960 y 800 462 2545  
 www.grupocitalud.com

**CONDICIONES**

**1.-** La Garantía se hará efectiva presentando esta póliza documentada y sellada por el establecimiento que la vendió o la factura, o recibo o comprobante junto con el producto en nuestro Centro de Servicio, ubicado en Avenida Tezozómoc No. 92, Colonia San Miguel Amantla, C.P. 02700, Azcapotzalco, Ciudad de México, México. Tel. 55 5574-3960 y 800 462 2545 donde podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

**2.-** Citalud, S.A. de C.V. a través de su centro de servicio al cliente, se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y componentes incluyendo mano de obra sin ningún cargo para el consumidor, esta garantía cubre los gastos de envío o transportación del producto que se deriven de su cumplimiento dentro de cualquier parte de la República Mexicana.

**3.-** El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía en el lugar de compra del producto o bien directamente en nuestro Centro de Servicio.

Citalud, S.A. de C.V. Garantiza por (5) años este producto en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a excepción del Brazalette que se Garantiza solo por (1) año por razones de uso.

**IMPORTANTE**

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- A) Cuando el producto se hubiere utilizado en condiciones distintas a las normales.  
 B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.  
 C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por persona no autorizada por Citalud, S.A. de C.V.

Producto: Marca: Modelo: Serie: Factura: Comprada: Fecha de Compra: Nombre del distribuidor: Dirección: Ciudad: Estado / C.P. 

SELLO