

10.00

Guía rápida en 3 pasos

IMPORTANTE
30 minutos antes de la medición



NO ALCOHOL, CAFÉ O TE



NO ESTRÉS




NO FUMAR



NO ACTIVIDAD FÍSICA

1 Colocación de pilas

Colocar pilas alcalinas de 1.5 V "AA" nuevas, no recargables.

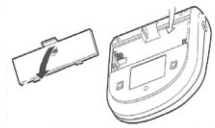


Conecte el brazalete como lo indica la imagen.



2 Colocación del brazalete

Coloque el brazalete en el brazo izquierdo como lo indica la imagen.

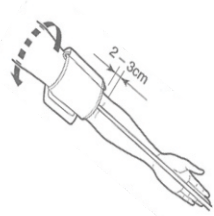


3 Medición de presión arterial



Siéntese con la espalda recta y apoyada, como lo muestra la imagen.

Presione START-STOP una vez y apoye el brazo de forma horizontal.

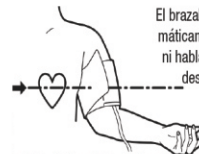

El brazalete se inflará automáticamente, sin moverse ni hablar, espere a que se desinfle y muestre los resultados.

Lea el manual de instrucciones de este medidor de presión antes de tomarse la presión por primera vez y/o cuando tenga alguna duda.

ATENCIÓN A CLIENTES

Si tiene alguna duda o experimenta problemas, llame:

Desde la Cid, de México Desde el Interior de la República

5574 3960 / 800 462 2545

13.5

10.00

CITIZEN

- PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador y Distribuidor en México:
Citisalud, S.A. de C.V.

Ubicado en:
Avenida Tezozómoc 92, Colonia San Miguel Amantla, C.P. 02700, Azcapotzalco, Ciudad de México.
55743960 y 800-462-2545
www.grupocitisalud.com

IMPORTANTE

Citisalud, S.A. de C.V. Garantiza por (5) años este producto en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a excepción del Brazalete que se Garantiza solo por (1) año por razones de uso.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- A) Cuando el producto se hubiere utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por persona no autorizada por Citisalud, S.A. de C.V.

CONDICIONES

1.- La Garantía se hará efectiva presentando esta póliza documentada y sellada por el establecimiento que la vendió o la factura, o recibo o comprobante junto con el producto en nuestro Centro de Servicio, ubicado en Avenida Tezozómoc 92, Colonia San Miguel Amantla, C.P. 02700, Azcapotzalco, Ciudad de México. 55743960 y 800-462-2545 donde podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

2.- Citisalud, S.A. de C.V. a través de su centro de servicio al cliente, se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y componentes incluyendo mano de obra sin ningún cargo para el consumidor, esta garantía cubre los gastos de envío o transportación del producto que se deriven de su cumplimiento dentro de cualquier parte de la República Mexicana.

3.- El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía en el lugar de compra del producto o bien directamente en nuestro Centro de Servicio.

Producto:

Marca:

Modelo:

Serie:

Factura:

Comprada:

Fecha de Compra:

Nombre del distribuidor:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

C.P.

SELLO