

Guía rápida en 3 pasos

IMPORTANTE
30 minutos antes de la medición



NO ALCOHOL, CAFÉ O TÉ



NO ESTRÉS



NO FUMAR




NO ACTIVIDAD FÍSICA

1

Colocación de pilas

Colocar pilas alcalinas de 1.5V "AAA" nuevas, no recargables.

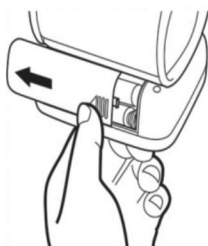

2

Colocación del brazalete

Coloque la palma de la mano hacia arriba y deje los dedos relajados coloque el brazalete como lo indica la imagen.



Ajuste el brazalete hasta que quede firme y cómodo.

3

Medición de presión arterial



Siéntese con la espalda recta y apoyada, como lo muestra la imagen.

Presione START-STOP una vez. Coloque el brazo cruzando, la mano hacia el hombro derecho.



El brazalete se inflará automáticamente, sin moverse ni hablar, espere a que se desinfe y muestre los resultados.

Lea el manual de instrucciones de este medidor de presión antes de tomarse la presión por primera vez y/o cuando tenga alguna duda.

ATENCIÓN A CLIENTES

Si tiene alguna duda o experimenta problemas, llame:

Desde la Cd. de México Desde el interior de la República

5574 3960 / 800 462 2545

CITIZEN

- PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador y Distribuidor en México:

Citissalud, S.A. de C.V.

Ubicado en:

Avenida Tezozómoc 92, Colonia San

Miguel Amantla, C.P. 02700,

Azcapotzalco, Ciudad de México.

55743960 y 800-462-25-45

www.grupocitissalud.com

IMPORTANTE

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- A) Cuando el producto se hubiere utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por persona no autorizada por Citissalud, S.A. de C.V.

CONDICIONES

1.- La Garantía se hará efectiva presentando esta póliza documentada y sellada por el establecimiento que la vendió o la factura, o recibo o comprobante junto con el producto en nuestro Centro de Servicio, ubicado en Avenida Tezozómoc 92, Colonia San Miguel Amantla, C.P. 02700, Azcapotzalco, Ciudad de México. 55743960 y 800-462-25-45 donde podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

2.- Citissalud, S.A. de C.V. a través de su centro de servicio al cliente, se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y componentes incluyendo mano de obra sin ningún cargo para el consumidor, esta garantía cubre los gastos de envío o transportación del producto que se deriven de su cumplimiento dentro de cualquier parte de la República Mexicana.

3.- El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía en el lugar de compra del producto o bien directamente en nuestro Centro de Servicio.

Producto:

Marca:

Modelo:

Serie:

Factura:

Comprada:

Fecha de Compra:

Nombre del distribuidor:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

C.P.

SELLO